

ADVARSEL:

- ⚠ Læs brugsanvisningen grundigt, før det digitale termometer anvendes.
- ⚠ Risiko for kvælning: Termometerets hætte og batteri kan forårsage livstruende situationer, hvis de indtages. Børn må ikke bruge termometeret uden forældrenes tilsyn.
- ⚠ Termometeret må ikke bruges i en bil. Termometeret er kun beregnet til aflæsning af målinger foretaget via munden, endetarmen og armhulen (axilla).
- ⚠ Termometerets batteri må ikke opbevares tæt på kraftig varme, da dette kan medføre, at det eksploderer.
- ⚠ Bemærk! Brug af probeovertræk kan medføre en afvigelse på 0,1°C fra den faktiske temperatur.
- ⚠ Det anbefales at kontrollere termometerets funktion hvert andet år.
- ⚠ Tag batteriet ud af termometeret, hvis det ikke skal bruges i en længere periode.
- ⚠ Det kan være farligt at selvdiagnosticere ved hjælp af temperaturmåling. Kontakt din læge for at få forklaret resultaterne. Selvdiagnosticering kan medføre, at en sygdomstilstand forværrer.
- ⚠ Termometeret må ikke bruges i våd tilstand, da målingerne kan være unøjagtige.
- ⚠ Undgå at bide i termometeret. Det kan medføre, at det går i stykker og/eller at du kommer til skade.
- ⚠ Forsøg ikke at skille termometeret ad eller reparere det. Det kan medføre unøjagtige resultater.
- ⚠ Termometeret skal altid desinficeres efter brug, især hvis det anvendes af mere end én person. Termometeret må ikke forceres op i endetarmen. Stop indføringen, og afbryd målingen, hvis du føler smerte. I modsat fald risikerer du at påføre skader.
- ⚠ Et termometer, der har været brugt i endetarmen, må ikke efterfølgende bruges i munden.
- ⚠ Termometeret må ikke bruges i munden på børn under 2 år.


LÆS DETTE GRUNDIGT, FØR TERMOMETERET TAGES I BRUG

Dette digitale termometer giver en hurtig og meget nøjagtig aflæsning af en persons kropstemperatur. Læs brugsanvisningen først for at sætte dig ind i dets funktioner og få pålidelige resultater i mange år fremover. Dette termometer er fremstillet i overensstemmelse med systemet angivet i EN 12470-3:2000*A 1:2009, ASTM E 111 2-00 (RC-godkendelse 2011). Producenten er godkendt iht. EN ISO 9001:2008 og EN ISO 13485:2012/AC:2012.

INDHOLD

1 termometer, 1 brugsanvisning, 1 etui

PRODUKTILLUSTRATION

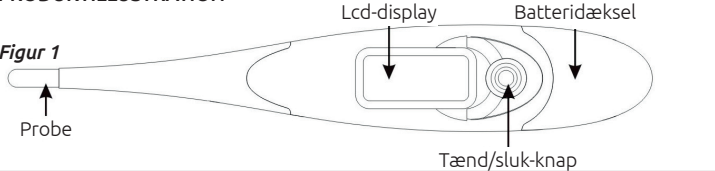

FORHOLDSREGLER ⚠

Termometerets ydeevne kan være nedsat i følgende situationer:

- Brug uden for det temperatur- og fugtighedsområde, der er angivet af producenten.
- Opbevaring uden for det temperatur- og fugtighedsområde, der er angivet af producenten.
- Mekanisk stød (f.eks. faldprøvnin).
- Patientens temperatur er lavere end den omgivende temperatur.

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr som mikrobølgeovne og mobiltelefoner, der genererer kraftige elektriske eller elektromagnetiske felter tæt på termometeret, da de kan udsende støj, der påvirker termometeret.

SYMBOLFORKLARING

— — —	Jævnstrøm	LOT	Batchkode
⚠	Anvendt del, type BF	🏭	Producent
⚠	Forsigtig, se den medfølgende dokumentation.		


SPECIFIKATIONER

Type	Digitalt termometer (ikke-prædiktivt)		
Temperaturområde	32,0°C - 42,9°C		
Nøjagtighed	±0,1°C, 35,5°C - 42,0°C ±0,2°C under 35,5°C eller over 42,0°C ved en omgivende temperatur på 18°C til 28°C		
Display	Lcd-display, 3 1/2 cifre		
Hukommelse	Til lagring af den sidst målte værdi		
Batteri	1 stk. 1,5 V DC knapcellebatteri (str. LR41 eller SR41, UCC 392)		
Batterilevetid	Ca. 200 timer		
Mål	13,9 cm × 2,3 cm × 1,3 cm (L × B × H)		
Vægt	Ca. 13 gram inklusive batteri		
Anvendelsesmiljø	Temperatur: 5°C ~ 40°C Relativ fugtighed: 15 % ~ 95 % RF		
Opbevaring- og transport	Temperatur: -20°C ~ 55°C Relativ fugtighed: 15 % - 95 % RF		
Beskyttelsesklasse	IP27		
Klassificering	Type BF		

BRUGSANVISNING

- Tryk på tænd/sluk-knappen ved siden af lcd-displayet. Der lyder en tone, og skærmen viser 188,5 efterfulgt af den senest registrerede temperatur. Efter visning af temperaturen fra selvtesten, går termometeret i testtilstand.
- Bemærk!** Hvis den målte temperatur er lavere end 32°C, vises teksten Lo på displayet. Hvis den målte temperatur er højere end 42,9°C, vises teksten Hi.
- Placer termometeret det ønskede sted (mund, endetarm armhule).
- a) Mund:** Placer termometeret under tungen som vist med positionen "✓" i figur 2. Luk munden, og træk vejret jævnt gennem næsen for at forhindre, at målingen påvirkes af indåndings- og udåndingsluften. En normal temperatur ligger mellem 35,7°C og 37,3°C.
- b) Endetarm:** Smør probens sølvspids med vaseline for at gøre den nemmere at indføre. Før forsigtigt sensoren ca. 1 cm op i endetarmen. En normal temperatur ligger mellem 36,2°C og 37,7°C.
- c) Armhule:** Aftør armhulen, så den er tør. Placer proben i armhulen, og hold armen presset god ind mod siden. Set fra et lægeligt synspunkt vil denne metode altid give unøjagtige aflæsninger og bør derfor ikke anvendes, hvis der kræves en præcis måling. En normal temperatur ligger mellem 35,2°C og 36,7°C.
- Gradtegnet blinker under målingen. Når det holder op med at blinke, lyder en alarm i cirka 10 sekunder. Det målte resultat vises samtidig på lcd-displayet. Minimummåletiden til tonen (bippet) skal altid overholdes. Målingen fortsætter efter tonen. Den viste temperatur ændres ikke, når termometeret fjernes fra målestedet.




Figur 2

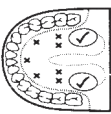

- Bemærk!** Tonen lyder normalt som: "Bi-Bi-Bi-Bi". Alarmen bipper hurtigere, når temperaturen når 37,8°C eller derover, og tonen lyder som: "Bi-Bi-Bi Bi-Bi-Bi Bi-Bi-Bi"
- Batteriets levetid forlænges ved at trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke termometeret, når målingen er afsluttet. Hvis termometeret ikke slukkes aktivt, slukker det automatisk efter ca. 10 minutter.
 - Opbevar termometeret i etuiet.

UDSKIFTNING AF BATTERIET

- Batteriet skal udskiftes, når  vises nederst til højre på lcd-displayet.
- Træk batteridækslet af, som vist i figur 3.
- Træk forsigtigt printkortet med batterirummet ca. 1 cm ud (se figur 4).
- Brug en spids genstand, f.eks. en pen, til at tage det gamle batteri ud. Bortskaf batteriet i henhold til de gældende regler. Isæt et nyt 1,5 V DC knapcellebatteri type LR41 eller SR41, UCC392 eller tilsvarende. Kontrollér, at batteriets "+"-pol vender opad. (se figur 5).
- Før batterirummet på plads, og sæt dækslet på.

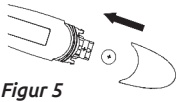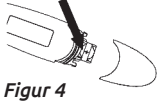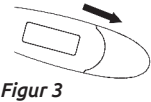

RENGØRING OG DESINFEKTION

Aftør termometeret med en ren, blød klud. Fastsidende snavs fjernes ved at aftørre termometeret med en kraftigt opvredet klud fugtet med vand eller et neutralt rengøringsmiddel. Afslut ved at tørre med en tør, blød klud. Overhold følgende for at undgå skader på termometeret.

- Brug ikke benzen, fortynder, fortynder eller andre kraftige opløsningsmidler til rengøring af termometeret.
- Delen med føleren må ikke neddyppes i alkohol i længere tid ad gangen, og det må ikke steriliseres med varmt vand (vand ved temperaturer på 50°C eller derover).
- Brug ikke ultralydsbad til rengøring af termometeret.

BEGRÆNSET GARANTI

Termometeret er omfattet af et års garanti fra købsdatoen. Hvis termometeret ikke fungerer korrekt på grund af defekte dele eller fejl i udførelsen, reparerer eller ombytter vi det vederlagsfrit. Alle komponenter med undtagelse af batteriet er omfattet af garantien. Garantien dækker ikke skader på termometeret som følge af forkert håndtering. Garantireparationen er betinget af, at den originale købskvittering eller en kopi af denne fra den oprindelige forhandler kan fremvises.



Bortskaffelse af produktet samt brugte batterier skal ske i overensstemmelse med de gældende nationale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.